



Instruktion för användande av munskydd

- 1** Tvätta händerna med tvål och vatten, alternativt sprita händerna, innan du tar på dig munskyddet.
- 2** Munskyddet ska täcka mun, näsa och haka och bäras under hela tillfället.
- 3** Ta av munskyddet genom att ta i banden, ta inte på själva munskyddet.
- 4** Släng använda munskydd i anvisad soppåse. Knyt ihop påsen och släng påsen med använda munskydd i vanliga avfallet.

Instructions for facemasks

- 1** Wash your hands with soap and water or alcohol-based hand sanitizer before putting on the facemask.
- 2** The facemask should cover the mouth, nose and chin and be worn throughout.
- 3** Remove the facemask by pulling on the straps, do not touch the facemask itself.
- 4** Dispose of used facemasks in designated garbage bag. Tie the bag together and throw the bag in the usual waste.